


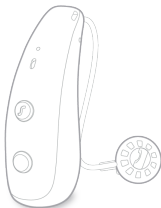

signia

Pure C&G MaX

Gebruikershandleiding



Inhoudsopgave

Aan de slag.....	4
Beoogd doel/Beoogd gebruik.....	4
Gebruiksindicaties.....	5
Uw hoortoestellen.....	6
Onderdelen.....	8
Bedieningsregelaars.....	9
Het inbrengen en uitnemen van de hoortoestellen.....	10
Aan- en uitzetten.....	16
LED-status.....	18
Het volume aanpassen.....	19
De hoortoestellen opladen.....	20
Onderhoud.....	22
De hoortoestellen reinigen.....	22

De oorstukjes reinigen.....	23
De oorstukjes vervangen.....	23
De oorsmeerfilters vervangen.....	25
Professioneel onderhoud.....	26
Belangrijke informatie.....	27
Veiligheidsinformatie.....	27
Omgevingsomstandigheden.....	28
Verwijderingsinformatie.....	30
Luisterspoel en ringleidingen.....	30
Bluetooth.....	31
Symbolen die in dit document worden gebruikt.....	32
Landspecifieke informatie.....	33

Aan de slag



LET OP!

- ▶ Lees deze gebruikershandleiding en de veiligheidsinstructies grondig en volledig door. Neem de veiligheidsinstructies in acht om schade of letsel te voorkomen.



OPMERKING

- ▶ Laad uw hoortoestellen volledig op voordat u ze voor het eerst gebruikt.
- ▶ Volg de instructies in de handleiding van de oplader.

Beoogd doel/Beoogd gebruik

Hoortoestellen zijn bedoeld om gehoorverlies bij slechthorenden te compenseren en kunnen worden gebruikt in alledaagse luistersituaties.

De AI-functie in het hoortoestel werkt zelfstandig binnen vooraf vastgestelde grenzen, op basis van invoer van de microfoons van het hoortoestel en parameters die in de aanpassingssoftware zijn ingesteld, om de signaalverwerking aan te passen. De AI-functie beschikt niet over zelflerende mogelijkheden nadat deze in het hoortoestel is geïmplementeerd.

Gebruiksindicaties

De hoortoestellen zijn bedoeld voor personen ouder dan 3 jaar met een gehoorverlies¹ van licht tot zeer ernstig en volledig gehoorverlies configuraties De diagnose van gehoorverlies moet worden bevestigd door een bevoegde audicien, bijvoorbeeld een audicien, audioloog of KNO-arts. Hoortoestellen moeten worden geprogrammeerd door een audicien die is opgeleid in hoorrehabilitatie en gehoorrevalidatie.

1 Wereldgezondheidsorganisatie, Wereldrapport over gehoor; 2021

Uw hoortoestellen

Gefeliciteerd met uw nieuwe hoortoestellen.

Of dit nu uw eerste paar hoortoestellen is of u al een ervaren gebruiker bent, deze gebruikershandleiding helpt u om het maximale uit uw nieuwe toestellen te halen.

Als dit uw eerste paar hoortoestellen is, kan het even duren voordat u eraan gewend bent. Draag ze zo vaak mogelijk. Hoe vaker u ze draagt, hoe sneller u eraan gewend raakt.

Het type hoortoestel dat u heeft, wordt RIC genoemd, wat staat voor 'luidspreker in gehoorgang' (receiver in canal). De hoortoestellen zitten achter uw oren en zijn via een dunne kabel verbonden met een oorstukje in uw gehoorgang. Elk hoortoestel bevat een oplaadbare batterij, die regelmatig moet worden opgeladen met een compatibele oplader. Uw hoortoestellen zijn compatibel met: Portable Charger Pure 2.0, Desktop Charger 2.0.

Uw hoortoestellen kunnen via Bluetooth-technologie worden gekoppeld aan uw Apple- of Android-telefoon. Hierdoor kunt u audio van uw telefoon naar uw hoortoestellen streamen.


Optionele functies

- ☐ De **tinnitus-therapie-functie** genereert een geluid om u af te leiden van uw tinnitus.
- ☐ Met de **luisterspoel**-functie kunt u geluid van bepaalde bronnen rechtstreeks naar uw hoortoestellen verzenden.

Optionele accessoires

Voor uw hoortoestellen zijn er accessoires zoals de TV Sound audio streamer en de Remote Control. Vraag uw audicien naar andere accessoires voor uw hoortoestellen

Onderdelen

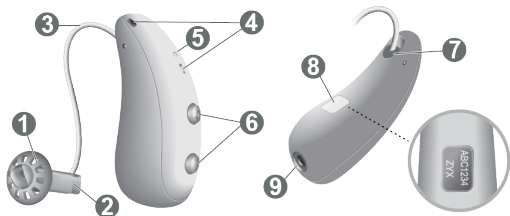

- 1 Oorstukje
- 2 Luidspreker
- 3 Luidsprekercabel
- 4 Microfoonopeningen
- 5 LED
- 6 Drukknoppen
- 7 Zij-indicator (rood = rechteroor, blauw = linkeroor) en luidsprekerverbinding.
- 8 Serienummer en prestatieniveau
- 9 Laadcontacten

Het type oorstukje dat u gebruikt, is van invloed op de geluidskwaliteit. Overleg met uw audicien voordat u overstapt op een ander type oorstukje.

OPMERKING

Uw hoortoestellen kunnen er iets anders uitzien dan weergegeven op de afbeeldingen in deze handleiding. De functionaliteit is hetzelfde en de beschrijvingen gelden nog steeds voor uw hoortoestellen.

Bedieningsregelaars

Uw hoortoestel heeft drukknoppen met de volgende functies:

Kort drukken (korter dan 1,5 seconden)

Wijzigt het volumeniveau of programma, indien ingesteld door uw audicien.

Gemiddeld lang drukken (1,5-5 seconden)

Start en stopt de audio stream van het optionele TV Sound accessoire. Het hoortoestel kan worden aangezet met de onderste drukknop.

Lang drukken (langer dan 5 seconden op de onderste drukknop)

Schakelt het hoortoestel uit.


Het inbrengen en uitnemen van de hoortoestellen

Uw linker- en rechterhoortoestel zijn verschillend, en elk hoortoestel moet worden gedragen in het oor waarvoor het is bedoeld. Elk hoortoestel heeft een gekleurd gedeelte dat aangeeft voor welke zijde het hoortoestel bestemd is. Dit gedeelte is rood op het rechterhoortoestel en blauw op het linkerhoortoestel.


Ga als volgt te werk om een hoortoestel in te brengen:

1. Zorg ervoor dat elk oorstukje in dezelfde richting buigt als de kabel van de luidspreker.


a) Juist:

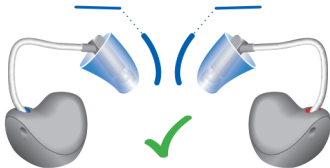

b) Onjuist:

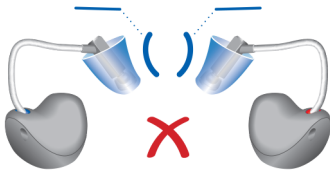

2. Plaats het hoortoestel over de bovenkant van uw oor. Zorg ervoor dat het stevig en comfortabel zit **1**.
3. Pak de kabel van de luidspreker vast op de plek waar deze op de luidspreker aansluit.
4. Duw het oorstukje voorzichtig in de gehoorgang **2** en pas het aan totdat het comfortabel zit.

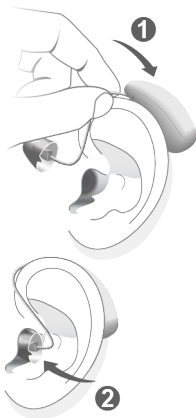

LET OP!

Risico op letsel!

- ▶ Draag de luidsprekerverbinding altijd met een oorstukje.
- ▶ Zorg ervoor dat het oorstukje stevig en goed aan de luidspreker is bevestigd.
- ▶ Plaats het oorstukje volledig in de gehoorgang.
- ▶ Duw het oorstukje niet te diep.

LET OP!

Risico op letsel!

- ▶ Als het oorstukje losraakt van de luidspreker en in uw oor blijft steken, laat het dan door een medisch deskundige verwijderen.
- ▶ Mocht een ander onderdeel van het hoortoestel in uw oor vast komen te zitten, laat dit dan door een medisch deskundige verwijderen.



OPMERKING


- ▶ Plaats het rechter hoortoestel met uw rechterhand en het linker hoortoestel met uw linkerhand.
- ▶ Trek met uw andere hand uw oorlel naar beneden om het inbrengen van het hoortoestel te vergemakkelijken.

Ga als volgt te werk om een hoortoestel te verwijderen:

1. Als u een op maat gemaakt oorstukje gebruikt, trek dan het verwijderingskoordje voorzichtig richting de achterkant van uw hoofd.
2. Als u een standaard oorstukje gebruikt, pakt u de luidspreker vast en trekt u deze voorzichtig naar buiten ①.

Trek niet aan de kabel van de luidspreker.

3. Til het hoortoestel op en schuif het over de bovenkant van uw oor ②.

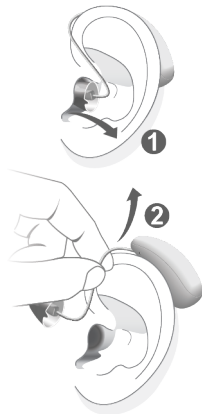

Aan- en uitzetten

Aanzetten

Kies een van de volgende opties om de hoortoestellen in te schakelen:

- Haal de hoortoestellen na het opladen uit de oplader. Ze schakelen automatisch in.
- Houd de onderste drukknop ingedrukt totdat er een melodie klinkt.

Wanneer de hoortoestellen aan gaan, brandt de LED groen.



Uitzetten

Kies een van de volgende opties om de hoortoestellen uit te schakelen:

- Plaats de hoortoestellen in de lader. Ze schakelen automatisch uit.

- Houd de onderste drukknop minstens 5 seconden ingedrukt. Er klinkt een uitschakelmelodie.

Wanneer de hoortoestellen uit gaan, brandt de LED rood.



LED-status

De LED van het hoortoestel geeft informatie over de stroomstatus van het hoortoestel.

LED-status	Beschrijving
 Brandt groen gedurende 6 seconden	Het hoortoestel is ingeschakeld. Dit gebeurt wanneer u het hoortoestel inschakelt met de bedie- ningsregelaars of het hoortoestel uit de oplader haalt.
 Knippert rood gedurende 3 seconden	Het hoortoestel wordt uitgeschakeld. Dit gebeurt wanneer u het hoortoestel uitschakelt met de onderste drukknop.

Uw hoortoestellen hebben een verzorgersfunctie. Wanneer de verzorgersfunctie is geactiveerd, knippert de LED elke vijf seconden om de batterijstatus aan te geven. Vraag uw audicien om deze functie in te schakelen.

LED-status	Beschrijving
 Knippert groen gedurende 5 seconden	Het hoortoestel is ingeschakeld
 Knippert rood gedurende 5 seconden	Het hoortoestel is bijna leeg.

Het volume aanpassen

Uw hoortoestellen passen het volume in realtime aan om zich aan uw omgeving aan te passen. Gebruik een compatibele smartphone-app, een compatibele afstandsbediening of de bedieningsregelaars op de hoortoestellen om het volume handmatig aan te passen.

Meldingstonen geven aan wanneer het volume op het minimum-, maximum- of middenniveau staat. Gebruik een compatibele smartphone-app of vraag uw audicien om ze aan te passen.

De hoortoestellen opladen

Volg de stappen in de gebruikershandleiding van de oplader om de hoortoestellen in een compatibele oplader op te laden.

Laad uw hoortoestellen elke nacht op, ook als ze nog niet helemaal leeg zijn. U kunt de hoortoestellen gerust in de oplader laten zitten nadat ze volledig zijn opgeladen.

Het duurt ongeveer 4 uur om de hoortoestellen volledig op te laden. Na een half uur opladen hebben ze ongeveer 6 uur batterijvermogen.

Als de batterij van uw hoortoestellen leeg raakt, schakelen ze automatisch uit. Laad uw hoortoestellen zo snel mogelijk op om een diepe ontlading te voorkomen.



OPMERKING

Om een diepe ontlading te voorkomen, moet u uw hoortoestellen minstens één keer per zes maanden opladen. Als er een diepe ontlading optreedt, moet de batterij worden vervangen. Neem contact op met uw audicien.

Indicatie voor laag batterijvermogen

Als de batterij van uw hoortoestellen bijna leeg is, klinkt er een waarschuwingsmelodie. Afhankelijk van uw instellingen klinkt er elke 15 tot 30 minuten een waarschuwingsmelodie.

Wanneer de hoortoestellen beginnen met het afspelen van een waarschuwingsmelodie om u te laten weten dat de batterij bijna leeg is, heeft u nog ongeveer 90 minuten vermogen over.

Onderhoud

De hoortoestellen reinigen

Ga als volgt te werk om uw hoortoestellen te reinigen:

- Veeg de buitenkant van het hoortoestel af met een zachte, droge doek.
- Als er openingen verstopt zijn, verwijder het verstoppende materiaal dan door te blazen of het weg te vegen met een zachte, droge doek.
- Reinig de oplaadcontacten op uw hoortoestellen en op de oplader met een droge doek.



OPMERKING

- Gebruik geen alcoholhoudende of chemische oplosmiddelen op de oplaadcontacten.
- Houd de hoortoestellen niet onder stromend water.
- Dompel de hoortoestellen niet onder in water.
- Oefen geen druk uit op de hoortoestellen.

Neem contact op met uw audicien voor meer informatie over reinigingsproducten en hoe u uw hoortoestellen in goede staat kunt houden.

Als uw hoortoestellen nat zijn, veeg ze dan af met een zachte, droge doek en wacht een paar uur totdat ze volledig droog zijn voordat u ze gebruikt.

De oorstukjes reinigen

Er hoopt zich oorsmeer op de oorstukjes op, wat de geluidskwaliteit beïnvloedt. Ga als volgt te werk om de oorstukjes te reinigen:

1. Haal het oorstukje los van de luidspreker.
2. Reinig het oorstukje met een zachte, droge doek.


Oorsmeerfilters kunnen niet worden gereinigd en moeten regelmatig worden vervangen.

De oorstukjes vervangen


Oorstukjes moeten minstens om de drie maanden worden vervangen, en telkens wanneer ze zichtbaar beschadigd zijn.

Ga als volgt te werk om een oorstukje te vervangen:

1. Pak de zijkant van het oorstukje vast en buig het van de luidspreker af totdat het loskomt.

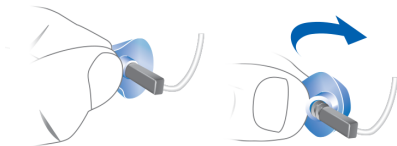


2. Houd het nieuwe oorstukje in de ene hand en de luidspreker in de andere hand.
3. Druk het oorstukje stevig op de luidspreker totdat het niet verder kan.
4. Zorg ervoor dat het oorstukje volledig is aangesloten op de luidspreker.

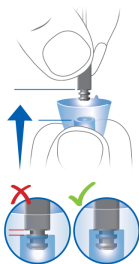

De oorsmeerfilters vervangen

Wanneer zich te veel oorsmeer in een oorsmeerfilter heeft opgehoopt, moet deze worden vervangen. Ga als volgt te werk om een oorsmeerfilter te vervangen:

1. Verwijder het oorstukje zodat u het oorsmeerfilter kunt zien.
2. Druk het uiteinde van het hulpmiddel voor het vervangen van het oorsmeerfilter recht in het oude oorsmeerfilter ①.
3. Trek het hulpmiddel recht naar buiten en verwijder het oude oorsmeerfilter ②.
4. Draai het hulpmiddel om en druk het nieuwe oorsmeerfilter op zijn plaats ③.
5. Trek het hulpmiddel recht naar buiten en laat het nieuwe oorsmeerfilter op zijn plaats zitten.
6. Gooi het hulpmiddel weg.

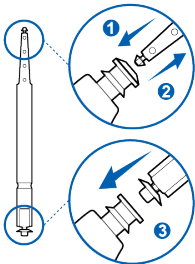

Professioneel onderhoud

Af en toe hebben uw hoortoestellen wellicht een grondigere reiniging en onderhoud nodig dan u zelf kunt uitvoeren. Bespreek de mogelijkheden met uw audicien.

Belangrijke informatie

Veiligheidsinformatie

In geval van een ernstig incident dient u het voorval te melden aan de fabrikant van het apparaat en aan de bevoegde autoriteit waaronder de gebruiker en/of de patiënt valt of woont.

Raadpleeg de veiligheidshandleiding voor meer veiligheidsinformatie.

Omgevingsomstandigheden

De hoortoestellen zijn bedoeld voor gebruik en opslag onder de volgende omgevingsomstandigheden:

Gebruiksom- standigheden	In gebruik	Opladen
Temperatuur	0–50 °C (32–122 °F)	10–35 °C (50–95 °F)
Relatieve lucht- vochtigheid	5–93%	5–93%
Atmosferische druk	700–1060 hPa	700–1060 hPa

De volgende voorwaarden gelden tijdens langdurige opslag en transport:

Gebruiksom- standigheden	Opslag	Transport
Temperatuur (aanbevolen)	10–25 °C (50–77 °F)	-20–60 °C (-4–140 °F)
Temperatuur (maximaal bereik)	10–40 °C (50–104 °F)	-20–60 °C (-4–140 °F)
Relatieve lucht- vochtigheid (aanbevolen)	20–80%	5–90%
Relatieve lucht- vochtigheid (maximaal bereik)	10–80%	5–90%
Atmosferische druk	700–1060 hPa	700–1060 hPa

Hoortoestellen moeten ten minste om de zes maanden worden opgeladen om een storing in de batterij te voorkomen.

Verwijderingsinformatie

Hoortoestellen, opladers en accessoires moeten worden afgevoerd bij inzamelpunten voor elektrisch afval en elektronische apparatuur.

Vraag bij uw gemeente na hoe u de hoortoestellen op de juiste manier kunt afvoeren, of breng ze terug naar uw audicien voor een veilige afvoer.

Luisterspoel en ringleidingen

Uw hoortoestellen zijn uitgerust met een luisterspoel. De luisterspoel ontvangt geluid rechtstreeks van een ringleiding. Ringleidingen zijn in sommige openbare ruimtes geïnstalleerd. Let op dit symbool.



Om verbinding te maken met een ringleiding, schakelt u over naar het speciale luisterspoelprogramma in uw hoortoestellen.

Bluetooth

Wanneer u met het vliegtuig reist, kan u worden gevraagd om Bluetooth uit te schakelen tijdens het opstijgen en landen. Schakel Bluetooth-functie uit via de smartphone-app.

Symbolen die in dit document worden gebruikt



Informatie over potentieel gevaarlijke en schade-lijke situaties waarvan de gebruiker zich bewust moet zijn.



Informatie over mogelijke situaties die schade kunnen toebrengen aan het toestel en andere eigendommen.



Informatie die het gebruik en de bediening van het toestel verbetert of vergemakkelijkt.



Geeft aan dat het toestel voldoet aan de eisen van de Europese CE-markeringsrichtlijnen.



Contactgegevens van de wettelijke fabrikant van het apparaat.

Landspecifieke informatie

VS en Canada

Certificeringsinformatie voor hoortoestellen met draadloze functie:

Pure C&G MaX

- HVIN: RFM030
- Bevat FCC ID: 2AXDT-RFM030
- Bevat IC: 26428-RFM030

Europese Unie

Hierbij verklaart WSAUD A/S dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

Het product bevat radiozenders die werken op (maximale waarden): 300 μ W @ 10.6 MHz, 4.0 mW @ 2.45 GHz.

Een kopie van de conformiteitsverklaring volgens 2014/53/EU is te vinden op: www.wsaud.com

Ga voor meer informatie naar
www.wsaud.com





Wettelijke fabrikant

WSAUD A/S
Nymøllevej 6
3540 Lyngø
Denemarken

CE
0123



21054667

www.signia.net

Document No. 32_D00367649_NL-NL_REV02 | Master Rev02, 06.2026
www.wsaud.com © 07.2026, WSAUD A/S. All rights reserved.